

mediven[®] thrombexin[®] 18

Meia de compressão medicinal de profilaxia da trombose com 18 mmHg de compressão no tornozelo.

Indicações

- Profilaxia física da trombose para pacientes imobilizados, no período pré, intra e pós-operatório
- Puérperas
- Pacientes acamados

Modo de acção

O pré-requisito para obter a aceleração profilacticamente eficaz do fluxo sanguíneo é o gradiente de pressão correcto, ou seja, decrescente de distal para proximal. O nosso conceito experimentado e testado da tecnologia de elasticidade nos dois sentidos torna possível proporcionar o nível máximo de cuidados com a gama mais restrita de tamanhos de meias, para perímetros até 100 cm.


Características

- Meia de malha anatómica com um gradiente de pressão de graduação precisa
- Manuseamento simples e que poupa tempo. Alivia a pressão da equipa de enfermagem e otimiza os cuidados ao paciente
- Sistema de tamanhos com código de cor para selecção rápida e simples do tamanho correcto da meia
- Adesão acrescida graças à elevada elasticidade e à malha especialmente macia, agradável para a pele e que estimula a sua respiração
- Elevada eficácia graças à múltipla utilização



Vantagens do produto

mediven thrombexin 18 garante sempre as características ideais de pressão: a compressão na perna reduz-se continuamente de distal para proximal.

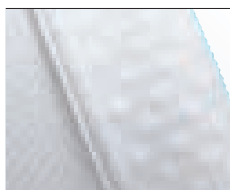

Banda de fixação inteligente
O banda de fixação em silicone, especialmente desenvolvido, evita o deslizamento informando de imediato sobre o ajuste correcto.




Dedos dos pés higiénicos
O material anti bacteriano e antimicótico dos dedos dos pés reduzem os microorganismos normais dos hospitais – mesmo após repetidas lavagens.



Calcanhar com codificação cromática
O calcanhar com código de cor, com superfície interior aveludada, reduz o perigo de feridas devidas à pressão, simplifica a classificação e mostra se o calcanhar assenta devidamente.

Auxiliar para calçar

O inovador butler hospitalar medi torna simples e fácil, para pacientes e pessoal, calçar as meias medicinais de profilaxia da trombose.

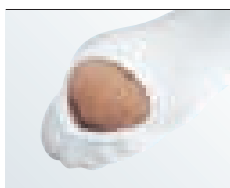

Abertura para inspecção
A inspecção não obstructiva na sola do pé permite inspecionar a circulação e reduz o perigo de queda.

* Medidas de números inteiros

No sentido de facilitar o manuseamento e a legibilidade, todas as medidas são indicadas em números inteiros de centímetros. Eventuais tamanhos em falta são cobertos por tolerâncias de medidas e de produção. Aplicam-se as regras internacionalmente reconhecidas relativas ao arredondamento por defeito ou por excesso (por defeito até 4/10, por excesso até 5/10). Isso mesmo já foi levado em consideração pelo fabricante nas fitas métricas de papel fornecidas.

Joelho (AD)

Tamanho	Medidas do membro inferior* (perímetro em cm)				Comprimento AD	Código de cor	
	Tornozelo cB	Barriga da perna cC	Abaixo do joelho cD	Coxa cG		Tornozelo	Coxa
XS	17 – 19	26 – 32	25 – 31	–	35 – 46	laranja	–
S	20 – 22	30 – 38	29 – 37	–	35 – 46	verde	–
M	23 – 25	34 – 44	33 – 43	–	35 – 46	violeta	–
L	26 – 28	38 – 48	37 – 47	–	35 – 46	azul	–
L-X	26 – 28	44 – 55	43 – 54	–	35 – 46	cinzento	–
XL	29 – 31	44 – 55	43 – 54	–	35 – 46	vermelho	–

Coxa (AG)

XS	17 – 19	26 – 36	25 – 35	40 – 50	60 – 84	laranja	laranja
S	20 – 22	30 – 42	29 – 41	48 – 60	65 – 89	verde	verde
S-X	20 – 22	30 – 42	29 – 41	56 – 70	65 – 89	verde	cinzento
M	23 – 25	34 – 46	33 – 45	56 – 70	65 – 89	violeta	violeta
M-X	23 – 25	34 – 46	33 – 45	64 – 80	65 – 89	violeta	cinzento
L	26 – 28	38 – 51	37 – 50	64 – 80	65 – 89	azul	azul
L-X	26 – 28	38 – 51	37 – 50	72 – 90	65 – 89	azul	cinzento
XL	29 – 31	42 – 55	41 – 54	72 – 90	65 – 89	vermelho	vermelho
XL-X	29 – 31	42 – 55	41 – 54	80 – 100	65 – 89	vermelho	cinzento

Coxa com cinto (AGT)

S	20 – 22	30 – 42	29 – 41	48 – 60	65 – 89	verde	verde
M	23 – 25	34 – 46	33 – 45	56 – 70	65 – 89	violeta	violeta
L	26 – 28	38 – 51	37 – 50	64 – 80	65 – 89	azul	azul
L-X	26 – 28	38 – 51	37 – 50	72 – 90	65 – 89	azul	cinzento