

ANTI-ESCARAS

 **NATURLAMB**  
PIEL MEDICINAL



BASIC



TECNIC




SINTETIC



**NATURLAMB**

PIEL MEDICINAL

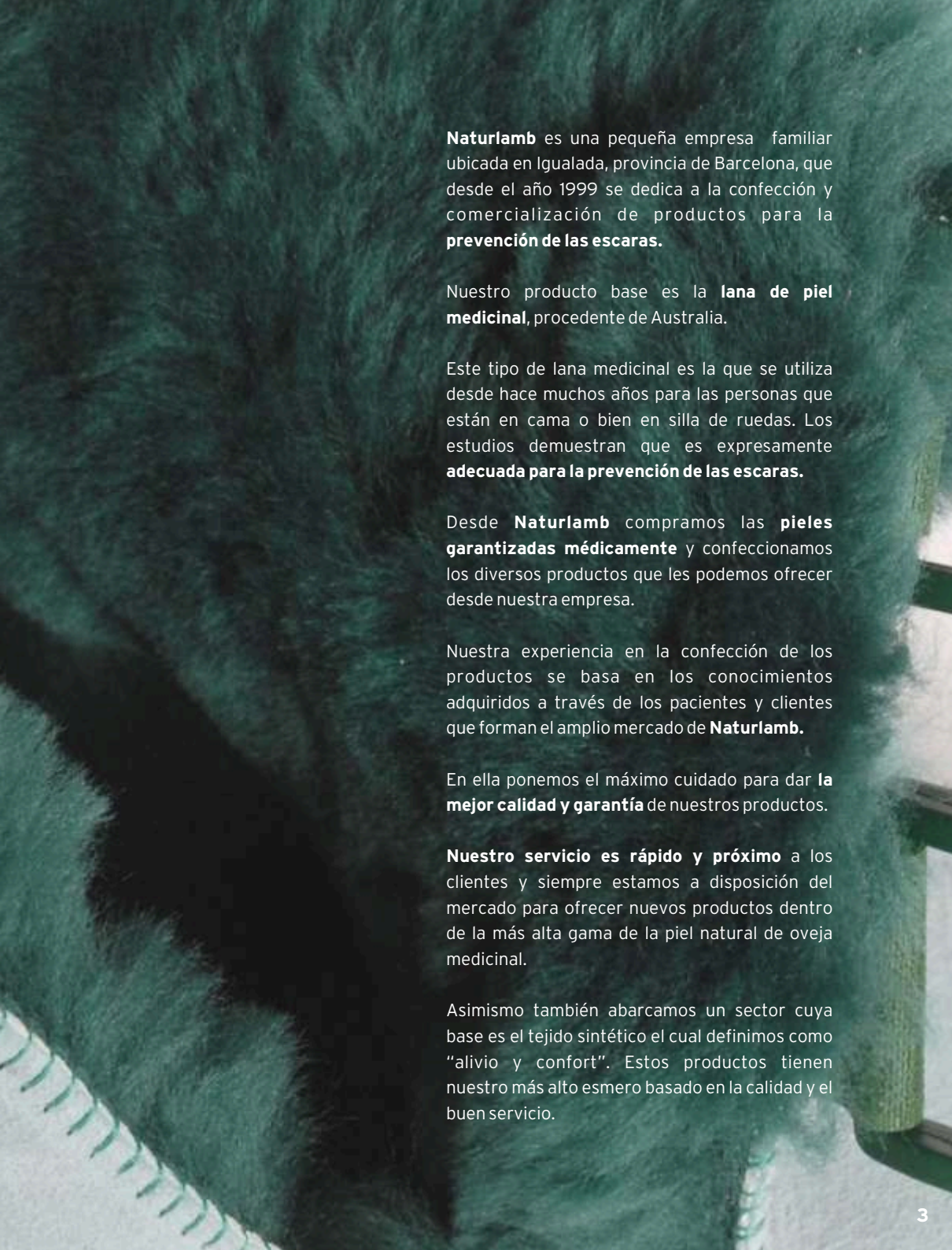

**Naturlamb** es una pequeña empresa familiar ubicada en Igualada, provincia de Barcelona, que desde el año 1999 se dedica a la confección y comercialización de productos para la **prevención de las escaras.**

Nuestro producto base es la **lana de piel medicinal**, procedente de Australia.

Este tipo de lana medicinal es la que se utiliza desde hace muchos años para las personas que están en cama o bien en silla de ruedas. Los estudios demuestran que es expresamente **adecuada para la prevención de las escaras.**

Desde **Naturlamb** compramos las **pieles garantizadas médicamente** y confeccionamos los diversos productos que les podemos ofrecer desde nuestra empresa.

Nuestra experiencia en la confección de los productos se basa en los conocimientos adquiridos a través de los pacientes y clientes que forman el amplio mercado de **Naturlamb.**

En ella ponemos el máximo cuidado para dar **la mejor calidad y garantía** de nuestros productos.

**Nuestro servicio es rápido y próximo** a los clientes y siempre estamos a disposición del mercado para ofrecer nuevos productos dentro de la más alta gama de la piel natural de oveja medicinal.

Asimismo también abarcamos un sector cuya base es el tejido sintético el cual definimos como "alivio y confort". Estos productos tienen nuestro más alto esmero basado en la calidad y el buen servicio.

Las úlceras por presión (escaras) son muy habituales en muchos hospitales de todo el mundo. Pueden afectar desde los recién nacidos hasta las personas mayores y son muy costosas en términos de recursos humanos y en la utilización de recursos médicos.

Los pacientes que han desarrollado úlceras por presión, requieren más cuidados y consecuentemente costos muy elevados.

En la línea **"BASIC" de Naturlamb** existe una amplia gama de productos confeccionados con pieles naturales de cordero escrupulosamente seleccionadas, para ayudar a reducir el riesgo de úlceras por presión, utilizando diseños tecnológicamente



avanzados y una de las fibras más naturales: **la lana**. Las cualidades terapéuticas y preventivas de los productos Naturlamb, mejoran la calidad de vida de las personas afectadas. Su eficacia reside en la estructura de las fibras de lana, cuyas principales propiedades son:

- Bajo coeficiente de fricción o de rozamiento.
- Alta absorción de la humedad (34% aproximadamente).
- Aislante contra el frío y el calor.
- Propiedades ignífugas.
- Propiedades antibacterianas y antiácaros.
- Propiedades terapéuticas y de prevención.

# NATURLAMB BASIC

## NATURAL



VISCOELÁSTICO

10.655



10.650



VISCOELÁSTICO

10.654



10.651



10.653



VISCOELÁSTICO

10.656



10.652

 **NATURLAMB**  
BASIC  
COJINES Y FUNDAS

- 10.650 Cojín cuadrado
- 10.651 Cojín abertura
- 10.652 Cojín anillo
- 10.653 Cojín herradura
- 10.654 Cojín viscoelástico
- 10.655 Cojín anillo viscoelástico
- 10.656 Cojín herradura viscoelástico
- 10.700 Funda silla "M"
- 10.701 Funda silla "L"
- 10.720 Respaldo silla
- 10.730 Asiento silla
- 10.750 Reposabrazos (par)





10.600



10.605



VISCOELÁSTICO

10.608



10.610



10.607



 **NATURLAMB**  
**BASIC**  
 ALMOHADAS Y MANTAS



201



103



100-115  
ref 201



100x50  
ref 100



120x60  
ref 101



105x70  
ref 102



140x70  
ref 103



80x70  
ref 104

- 100 Manta (100 x 50 cm)
- 101 Manta (120 x 60 cm)
- 102 Manta (105 x 70 cm)
- 103 Manta (140 x 70 cm)
- 104 Manta (80 x 70cm)
- 201 Piel original
- 10.600 Almohada roll
- 10.605 Almohada roll cervical
- 10.607 Almohada cervical viaje
- 10.608 Cojín lumbar viscoelástico
- 10.610 Almohada mariposa

 **NATURLAMB**  
BASIC  
BOTAS Y ARTICULACIONES





10.530



10.507



10.505



9.500 / 9.501

9.500 Bota derecha  
Tallas XXS, XS, S, M y L

9.501 Bota izquierda  
Tallas XXS, XS, S, M y L

10.502 Muñequera

10.505 Talonera

10.507 Talonera especial

10.510 Pernera

10.515 Rodillera

10.520 Codera

10.530 Saco para pies

**XXS** > 27-31

**XS** > 32-35

**S** > 36-39

**M** > 40-43

**L** > 44-47



10.504



▲ ▲ Reparto de peso ▲ ▲

25.000

El Set ordenador relaja las muñecas y previene el síndrome del túnel carpiano.



50.500



10.506

- 10.504 Reposamanos (par)
- 10.506 Manopla
- 25.000 Plantillas (par)
- 25.200 Expositor de plantillas (15 unidades)
- 50.500 Set ordenador

# NATURLAMB BASIC PLANTILLAS Y COMPLEMENTOS

Plantillas para utilizar todo el año. Muy cálidas en invierno y frescas en verano.

Absorben la humedad y mantienen el pie seco. Disponible en todas las tallas para hombre y mujer.



## INSTRUCCIONES DE LAVADO



- 1 Lavado a mano o a máquina, con jabón líquido neutro.
- 2 No utilizar lejía ni detergentes que contengan enzimas, fosfatos peróxidos y álcalis.
- 3 Temperatura máxima 30°C.
- 4 Permite el centrifugado.
- 5 Secar a la sombra, no situar cerca de una fuente de calor.
- 6 Con el producto aún húmedo, realizar un estirado suave para recuperar la suavidad y la forma original.
- 7 Incluso realizando dicha operación, por ser la piel un producto natural, después del lavado puede presentar un encogimiento de un 5%. Con el tiempo el color natural puede bajar de intensidad por la acción de la luz.

Las úlceras por presión (escaras) son muy habituales en muchos hospitales de todo el mundo. Pueden afectar desde los recién nacidos hasta las personas mayores y son muy costosas en términos de recursos humanos y en la utilización de recursos médicos. Los pacientes que han desarrollado úlceras por presión, requieren más cuidados y consecuentemente costos muy elevados.

Las características de la línea **"TECNIC" de Naturlamb** son semejantes a la línea "Basica", ya que se trata de una selección de pieles que provienen de corderos de la raza merino previamente seleccionados en Australia. Éste tipo de cordero tiene unas características particulares como: la gran densidad de fibras



por centímetro cuadrado, entre 4.000 / 6.000 y la longitud de las mismas entre 25 / 30 mm., que es la que le confiere la distribución de la presión y el peso, como si fueran pequeños muelles que nunca se aplastan. Destacar que se puede lavar a **80°C** y aún siendo lana natural, se recomienda secar en la secadora.

En esta línea tenemos varios artículos fabricados con el sistema **Air Tec®**, el cual tiene la propiedad de transpiración y favorece la regeneración de la epidermis. Todos los productos de la línea **Técnica** se han estudiado para resistir el ácido úrico, la sangre y otros líquidos quirúrgicos. Lo regula un certificado que se denomina **UR**.

# NATURLAMB TECNIC



VISCOELÁSTICO

30.655



30.650



30.651



VISCOELÁSTICO

30.654



30.653



30.652



VISCOELÁSTICO

30.656



- 30.650 Cojín cuadrado
- 30.651 Cojín abertura
- 30.652 Cojín anillo
- 30.653 Cojín herradura
- 30.654 Cojín viscoelástico
- 30.655 Cojín anillo viscoelástico
- 30.656 Cojín herradura viscoelástico
- 30.700 Funda silla "M"
- 30.701 Funda silla "L"
- 30.720 Respaldo silla
- 30.730 Asiento silla
- 30.750 Reposabrazos (par)

30.700  
30.701  
30.720  
30.730  
30.750



Todos los productos  
NATURLAMB TECNIC  
están disponibles en  
verde y azul.



30.605



30.105



30.610



30.607



30.600



**NATURLAMB**  
TECNIC  
ALMOHADAS Y MANTAS



30.201



30.103



**100-115**  
ref 30.201



**100x50**  
ref 30.100



**120x60**  
ref 30.101



**105x70**  
ref 30.102



**140x70**  
ref 30.103



**80x70**  
ref 30.104

- 30.100 Manta (100 x 50 cm)
- 30.101 Manta (120 x 60 cm)
- 30.102 Manta (105 x 70 cm)
- 30.103 Manta (140 x 70 cm)
- 30.104 Manta (80 x 70cm)
- 30.105 Accesorio cama
- 30.201 Piel original
- 30.600 Almohada roll
- 30.605 Almohada roll cervical
- 30.607 Almohada cervical viaje
- 30.610 Almohada mariposa

Todos los productos  
NATURLAMB TECNIC  
están disponibles en  
verde y azul.



Todos los productos  
NATURLAMB TECNIC  
están disponibles en  
verde y azul.



\* CONSULTAR TALLAS

39.503



30.510



30.505

## NATURLAMB TECNIC BOTAS Y ARTICULACIONES

- 39.502 Bota abierta (par) \*CONSULTAR
- 39.503 Bota cerrada (par) \*CONSULTAR
- 39.504 Bota alta (par)  
Tallas S, M y L
- 30.505 Talonera
- 30.507 Talonera especial
- 30.510 Pnera
- 30.515 Rodillera
- 30.520 Codera
- 39.510 Bota derecha  
Tallas XXS, XS, S, M y L
- 39.511 Bota izquierda  
Tallas XXS, XS, S, M y L
- 30.520 Codera

- XXS** > 27-31
- XS** > 32-35
- S** > 36-39
- M** > 40-43
- L** > 44-47



30.504

El Set ordenador relaja las muñecas y previene el síndrome del túnel carpiano.



30.500

30.504 Reposamanos (par)

30.500 Set ordenador

## INSTRUCCIONES DE LAVADO



- 1 Lavado a mano o a máquina, con jabón líquido neutro.
- 2 No utilizar lejía ni detergentes que contengan enzimas, fosfatos peróxidos y álcalis.
- 3 Temperatura máxima 80°C.
- 4 Permite el centrifugado.
- 5 Se puede utilizar la secadora, si no excede de los 80°C.
- 6 No lavar junto a otros tejidos, ya que puede desteñir.

La línea de **Naturlamb Sintetic** se ha estudiado para dar un alto grado de **“alivio y confort”** a las personas que permanecen mucho tiempo en cama o bien en silla de ruedas. En los cojines y las mantas de doble cara hemos estudiado el tejido intentado que aún siendo sintético tenga la máxima suavidad en la parte superior del “suapel” y en verano nos dé más frescor la cara que contiene el algodón 100%, ya que es una fibra natural.

Trabajamos también con la viscoelástica en el interior de los cojines, ya sea en anillo, herradura o bien cuadrado cosa que nos permite ofrecer un producto mejor y más confortable. Asimismo hemos estudiado los colores buscando también en ellos la sensación de tejido agradable y bien confeccionado.





En cuanto a las botas, taloneras y demás complementos, con la calidad que ofrece Naturlamb, hemos perfeccionado y dado un acabado más elegante a estos tejidos.

Disponemos del color crudo liso o bien combinado en crudo y marrón para todos los productos así como diversas tallas en el caso de las botas.

Nuestra finalidad es ofrecer un producto diferente; cálido en invierno y fresco en verano, con una suavidad que reduzca el dolor y las molestias de las personas que están durante largos períodos en la cama o en silla de ruedas.

# NATURLAMB SINTETIC

## ALIVIO Y CONFORT



450



451



452



VISCOELÁSTICO

456



VISCOELÁSTICO

454



VISCOELÁSTICO

455



# NATURLAMB SINTETIC COJINES Y FUNDAS



- 450 Cojín cuadrado
- 451 Cojín abertura
- 452 Cojín anillo
- 453 Cojín herradura
- 454 Cojín viscoelástico
- 455 Cojín anillo viscoelástico
- 456 Cojín herradura viscoelástico
- 720 Respaldo silla
- 730 Asiento silla
- 750 Reposabrazos (par)



Los productos NATURLAMB  
SINTETIC están disponibles  
en crudo y combinado  
marrón/crudo



VISCOELÁSTICO

408



410



407

Los productos NATURLAMB  
SINTETIC están disponibles  
en crudo y combinado  
marrón/crudo

 **NATURLAMB**  
**SINTETIC**  
ALMOHADAS Y MANTAS



- 500 Manta doble cara  
(50 x 70 cm)
- 505 Manta doble cara  
(75 x 90 cm)
- 510 Manta doble cara  
(150 x 90 cm)
- 600 Cubrecama  
(50 x 70 cm)
- 605 Cubrecama  
(75 x 90 cm)
- 610 Cubrecama  
(150 x 90 cm)
- 407 Almohada cervical viaje
- 408 Cojín lumbar viscoelástico
- 410 Almohada mariposa



Los productos NATURLAMB SINTETIC están disponibles en crudo y combinado marrón/crudo



307



307



307



320



321



321



325



# NATURLAMB SINTETIC BOTAS Y ARTICULACIONES

- 300 Talonera
- 307 Talonera especial
- 320 Bota abertura posterior  
Tallas S, M y L
- 321 Bota alta (par)
- 325 Codera
- 326 Manopla

S > 36-39 / M > 40-43 / L > 44-47

 **NATURLAMB**  
**SINTETIC**  
COMPLEMENTOS





- 13.001 Saco para silla de ruedas  
De 1 a 6 años
- 13.002 Saco para silla de ruedas  
De 6 a 12 años
- 13.003 Saco para silla de ruedas  
Junior
- 13.004 Saco para silla de ruedas  
Senior
- 13.010 Cinturón de sujeción
- 13.011 Chaleco pélvico de sujeción
- 13.012 Cinturón pélvico de sujeción



13.001  
13.002  
13.003  
13.004

## INSTRUCCIONES DE LAVADO



- 1 Lavado a mano o a máquina, con jabón líquido neutro.
- 2 No utilizar lejía ni detergentes que contengan enzimas, fosfatos peróxidos y álcalis.
- 3 Temperatura máxima 30°C.



A series of horizontal dotted lines for writing, spaced evenly down the page.



**2010 © Edita**  
Difusión Naturlamb sl

**Diseño gráfico e impresión**  
MgComunicació  
[www.mgcomunicacio.com](http://www.mgcomunicacio.com)

**Fotografias**  
Pep Mas  
[www.pepmas.com](http://www.pepmas.com)



**Difusión Naturlamb SL**

C. Nicolau Tous, 16 - 08700 Igualada, Barcelona

Tel. +34 93 805 18 33 - Fax +34 93 806 61 48

[www.naturlamb.es](http://www.naturlamb.es)

[difusion@naturlamb.es](mailto:difusion@naturlamb.es)

Distribuidor

---

CE

