



Yes, you can.®



Invacare® **Softform**

NOVO

Conforto e prevenção da escara

Invacare® **Softform** é uma nova linha de **colchões de alta qualidade**, complementada com **vários acessórios**, preparada para todas as situações. Os colchões são equipados de uma capa em Dartex® soldada e cosida, e compostos de espuma HR e/ou de espuma viscoelástica de alta qualidade. Estes produtos foram concebidos para proporcionar **máximo conforto** assegurando uma ajuda eficaz em termos de **prevenção e de acompanhamento dos cuidados da escara**.





➤ **A espuma, uma ajuda terapêutica para o tratamento da escara**

Esta tecnologia permite obter uma diminuição das zonas de pressão aumentando os pontos de apoio. O corpo todo afunda-se no colchão o que limita as zonas de pressão excessivas na pele sensível do utilizador.

➤ **Materiais de Qualidade**

Cada colchão **Softform** é coberto de uma capa em Dartex® impermeável cosida e soldada, também é permeável ao vapor de água. Esta capa, vai pela sua textura suave e bi-extensível, limitar os efeitos de fricção e de corte.

As espumas utilizadas são de alta qualidade e bio compatíveis. Utilizadas em conjunto com a capa em Dartex®, elas facilitam a regulação da temperatura o que limita também os efeitos de sudação.

➤ **Cortes Inovadores**

Cada parte da espuma em contacto com o utente foi especialmente cortada para obter uns relevos maleáveis e macios que vão permitir que o utente se afunde no colchão e não sofra de cortes na pele.

O colchão **Premier Glide** é composto de um sistema reconhecido a nível mundial composto de filmes em latex deslizantes afim de evitar movimentos do colchão na cama.



Cada colchão é equipado de rebordos estabilizadores em espuma HR de densidade 40kg/m³ e com uma capacidade de porte muito elevada (200N) para evitar a basculação do utente de lado e o ajudar aquando a transferências.

➤ **Acessórios**

A linha **Softform** foi complementada com acessórios desenvolvidos para melhorar a postura do utente na posição deitada, ajudando à redução dos pontos de pressão, para a prevenção de aparecimento de escaras nas áreas mais vulneráveis do corpo : cabeça, tronco, cotovelos, calcanhares ...

➤ **As normas Europeias - Conformidade**

Os colchões **Softform** estão em conformidade com as directivas europeias e de acordo com as normas anti combustão mais rigorosas em vigor (EN NF 597 partes 1 & 2 e EN7177: 1996 Crib 5), para uma máxima segurança e conforto do utilizador.

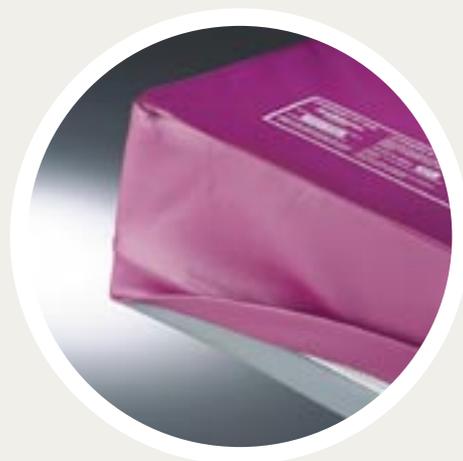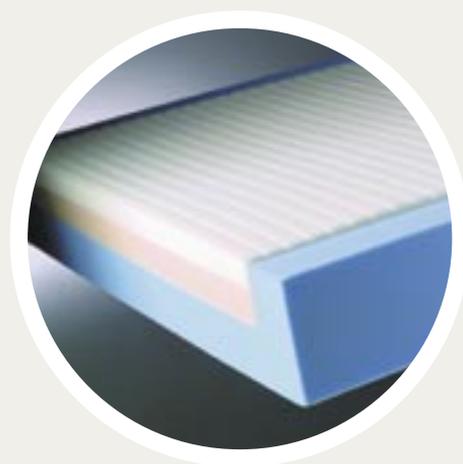



- colchão **Invacare® Softform Premier Glide**, é composto por 2 partes de espuma, distintas, de alta densidade agrupadas numa mesma capa em Dartex®. Cada uma das partes é coberta de um filme deslizante de latex, assegurando assim um máximo conforto.
- deslizamento das duas partes numa na outra limita os riscos de fricção. Evita ainda o habitual deslize do corpo para os pés da cama ou a subida do colchão para a cabeceira aquando às regulações da articulação do estrado eléctrico.

Indicado para utentes com elevado risco de escaras e para o acompanhamento dos cuidados da escara até ao estado 3.




Invacare® Premier Visco

O colchão **Invacare® Softform Premier Visco** é composto por uma base de espuma densidade 40 kg/m³ de porte forte (200N) com rebordo estabilizador e de uma base superior de espuma visco elástica de densidade 55 kg/m³. A combinação das espumas e qualidade das mesmas facilita a regulação de temperatura e limita os efeitos de sudoreação.

Indicado para utentes com riscos médio de aparecimento de escara ou igual a 14 na escala de Norton, e acompanhamento dos cuidados da escara de estado 1 e 2.



O Sobre-colchão **Invacare® Propad Visco** é composto de espuma visco elástica, de alta densidade sensível à temperatura do corpo. Facilita desta forma a redução das escaras garantindo um máximo conforto. A cobertura é impermeável e permeável ao vapor.

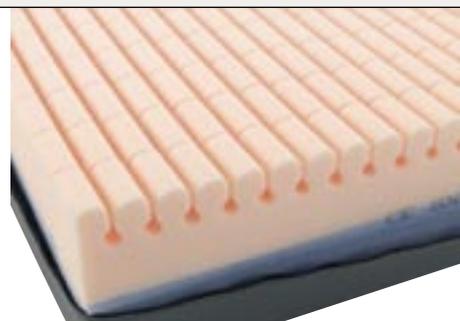

Invacare® Excel

O colchão **Invacare® Softform Excel** é formado de espuma recortada para melhor distribuição do peso do utente, promovendo elevado conforto e facilitando a prevenção de escaras. Fornece excelente recuperação e durabilidade e ajuda a reduzir deformações e forças de fricção. A base do colchão caracteriza-se por uma firme camada de espuma que proporciona um substancial apoio. A capa é de alta qualidade resistente e permeável ao vapor.




Apoio de perna Propad

- Composto de espuma de densidade 40kg/m³
- Liberta os pontos de pressão ao nível do calcanhar aumentando a zona de apoio nos gêmeos.



Almofada universal Flexipad

- Disponível com ou sem fita de fixação
- Composto de espuma visco elástica de 55 kg/m³ e de gel visco fluído de alta qualidade.
- Evita pressões em várias zonas sensíveis à escara

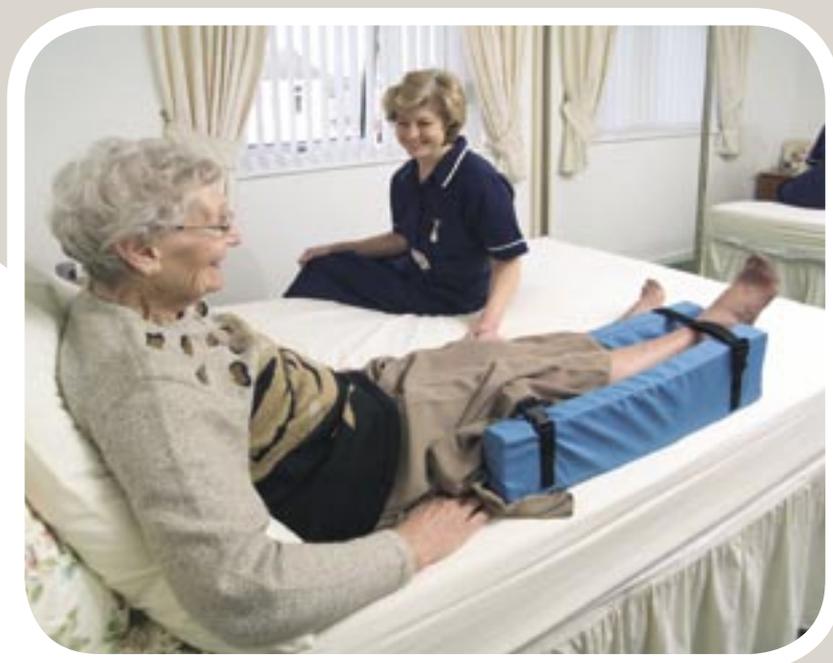

Apoio de calcanhares Softform duplo ou simples

- Compostos de espuma HR de densidade 40 kg/m³ e de gel visco fluído
- Minimiza as zonas de pressão ao nível dos maléolos e dos calcanhares graças ao aumento dos pontos de apoio.
- Utilizados em conjunto com o apoio de perna em cunha Softform Wedge ou sós.



Apoio de perna em cunha Softform Wedge

- Permite obter uma dobra dos joelhos em camas eléctricas bipartidas.

A Escara

➤ Definição:

A escara é uma lesão mais ou menos profunda da pele, ligada a uma compressão excessiva e prolongada dos tecidos entre os corpos e o plano de apoio. Esta pressão excessiva pode suprimir a circulação sanguínea e levar à escara.

Os factores de risco:

- Magreza
- Subnutrição
- Problemas vasculares, diabetes ...
- Envelhecimento
- Problemas neurológicos
- Mau suporte
- Má postura
- Tabagismo
- Alteração das funções respiratórias

Os colchões são uma ajuda em termos de prevenção e de acompanhamento dos cuidados da escara. É indispensável efectuar as mudanças de posição todas as 2 horas e de manter um acompanhamento clínico, de enfermagem, hidratação e de alimentação.

➤ Os quatro estados da escara :

A escara pode adquirir diversas formas: um simples vermelhão que irá persistir mais de um dia, um endurecimento da pele, uma ferida mais ou menos profunda podendo nos casos mais graves atingir os músculos ou o osso subjacente.

Estado 1 : Eritema

Vermelhão que não esbranquece sobre a pressão de um dedo.

Estado 2 : Inflamação da epiderme

Inflamação cutânea afectando a epiderme e eventualmente a derme, da qual uma variante é a flictena hemática ou serosa.

Estado 3 : Necrose

Úlcera profunda com crosta negra seca ou húmida que cobre os tecidos subjacentes, também eles com necrose.

Estado 4 : Ulceração

Úlcera aberta profunda, resultante da maior parte das vezes duma escara do estado 3 após a eliminação total ou parcial dos tecidos necróticos.

➤ As escalas de medida


A fim de utilizar os meios adequados face a estes casos, uma fase de avaliação dos riscos do paciente é indispensável. Para se fazer, existe três escalas de medida : Norton, Braden, Waterlow.

ESCALA DE BRADEN PARA AVALIAÇÃO DO RISCO DE ÚLCERAS DE PRESSÃO

Percepção sensorial Capacidade de reacção significativa ao desconforto	1. Completamente limitada: Não reage a estímulos dolorosos (não geme, não se retrai nem se agarra a nada) devido a um nível reduzido de consciência ou à sedação, OU capacidade limitada de sentir a dor na maior parte do seu corpo	2. Muito limitada: Reage unicamente a estímulos dolorosos. Não consegue comunicar o desconforto, excepto através de gemidos ou inquietação, OU tem uma limitação sensorial que lhe reduz a capacidade de sentir dor ou desconforto em mais de metade do corpo.	3. Ligeiramente limitada: Obedece a instruções verbais, mas nem sempre consegue comunicar o desconforto ou a necessidade de ser mudado de posição, OU tem alguma limitação sensorial que lhe reduz a capacidade de sentir dor ou desconforto em 1 ou 2 extremidades.	4. Nenhuma limitação: Obedece a instruções verbais. Não apresenta défice sensorial que possa limitar a capacidade de sentir ou exprimir dor ou desconforto.
Humidade Nível de exposição da pele à humidade	1. Pele constantemente húmida: A pele mantém-se sempre húmida devido a sudorese, urina, etc. É detectada humidade sempre que o doente é deslocado ou virado.	2. Pele muito húmida: A pele está frequentemente, mas nem sempre, húmida. Os lençóis têm de ser mudados pelo menos uma vez por turno.	3. Pele ocasionalmente húmida: A pele está por vezes húmida, exigindo uma muda adicional de lençóis aproximadamente uma vez por dia.	4. Pele raramente húmida: A pele está geralmente seca; os lençóis só têm de ser mudados nos intervalos habituais.
Actividade Nível de actividade física	1. Acamado: O doente está confinado à cama.	2. Sentado: Capacidade de marcha gravemente limitada ou inexistente. Não pode fazer carga e/ou tem de ser ajudado a sentar-se na cadeira normal ou de rodas.	3. Anda ocasionalmente: Por vezes caminha durante o dia, mas apenas curtas distâncias, com ou sem ajuda. Passa a maior parte dos turnos deitado ou sentado.	4. Anda frequentemente: Anda fora do quarto pelo menos duas vezes por dia, e dentro do quarto pelo menos de duas em duas horas durante o período em que está acordado.
Mobilidade Capacidade de alterar e controlar a posição do corpo	1. Completamente imobilizado: Não faz qualquer movimento com o corpo ou extremidades sem ajuda.	2. Muito limitada: Ocasionalmente muda ligeiramente a posição do corpo ou das extremidades, mas não é capaz de fazer mudanças frequentes ou significativas sozinho.	3. Ligeiramente limitado: Faz pequenas e frequentes alterações de posição do corpo e das extremidades sem ajuda.	4. Nenhuma limitação: Faz grandes ou frequentes alterações de posição do corpo sem ajuda.
Nutrição Alimentação habitual	1. Muito pobre: Nunca come uma refeição completa. Raramente come mais de 1/3 da comida que lhe é oferecida. Come diariamente duas refeições, ou menos, de proteínas (carne ou lacticínios). Ingerir poucos líquidos. Não toma um suplemento dietético líquido OU está em jejum e/ou a dieta líquida ou a soros durante mais de cinco dias.	2. Provavelmente inadequada: Raramente come uma refeição completa e geralmente come apenas cerca de 1/2 da comida que lhe é oferecida. A ingestão de proteínas consiste unicamente em três refeições diárias de carne ou lacticínios. Ocasionalmente toma um suplemento dietético OU recebe menos do que a quantidade ideal de líquidos ou alimentos por sonda.	3. Adequada: Come mais de metade da maior parte das refeições. Faz quatro refeições diárias de proteínas (carne, peixe, lacticínios). Por vezes recusa uma refeição, mas toma geralmente um suplemento caso lhe seja oferecido, OU é alimentado por sonda ou num regime de nutrição parentérica total satisfazendo provavelmente a maior parte das necessidades nutricionais.	4. Excelente: Come a maior parte das refeições na íntegra. Nunca recusa uma refeição. Faz geralmente um total de quatro ou mais refeições (carne, peixe, lacticínios). Come ocasionalmente entre as refeições. Não requer suplementos.
Fricção e forças de deslizamento	1. Problema: Requer uma ajuda moderada a máxima para se movimentar. É impossível levantar o doente completamente sem deslizar contra os lençóis. Descai frequentemente na cama ou cadeira, exigindo um reposicionamento constante com ajuda máxima. Espasticidade, contraturas ou agitação leva a fricção quase constante.	2. Problema potencial: Movimentase com alguma dificuldade ou requer uma ajuda mínima. É provável que, durante uma movimentação, a pele deslize de alguma forma contra os lençóis, cadeira, apoios ou outros dispositivos. A maior parte do tempo, mantém uma posição relativamente boa na cama ou na cadeira, mas ocasionalmente descai.	3. Nenhum problema: Move-se na cama e na cadeira sem ajuda e tem força muscular suficiente para se levantar completamente durante uma mudança de posição. Mantém uma correcta posição na cama ou cadeira. Nota: Quanto mais baixa for a pontuação, maior será o potencial para desenvolver uma úlcera de pressão.	


Características Técnicas

Colchões

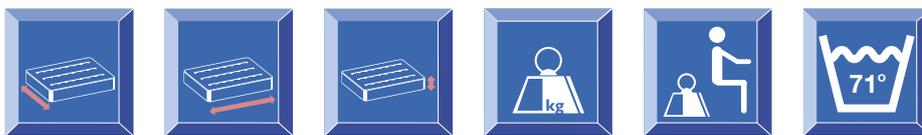

Propad Visco Overlay	80, 85.5, 88, 87.6 cm	187.5 cm	8.5 cm	7.1 kg	108 kg	71 °C
Premier Glide	80, 85.5, 88, 90 cm	195 - 210 cm	15.2 cm	13 kg	247.6 kg	71 °C
Premier Visco	80, 85.5, 88, 90 cm	200 cm	15.2 cm	13 kg	247.6 kg	71 °C
Excel	80, 85.5, 88, 90 cm	195 cm	15.2 cm	10 kg	140 kg	71 °C

Acessórios

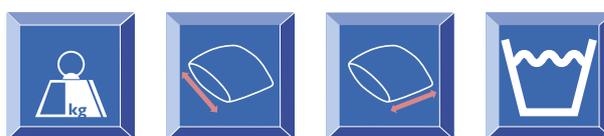

					Densidade Espuma
MLT/S	0.75 kg	51 cm	26 cm	71 °C	38 - 40 kg/m ³
MLT/M	0.75 kg	61 cm	28 cm	71 °C	38 - 40 kg/m ³
MLT/L	0.8 kg	66 cm	30 cm	71 °C	38 - 40 kg/m ³
FGP75	1 kg	33 cm	22 cm	71 °C	39 - 42 + 55 kg/m ³
FGP75/S	1.02 kg	33 cm	22 cm	71 °C	39 - 42 + 55 kg/m ³
HP50	1.44 kg	48 cm	32 cm	Toalhetes	32 - 34 kg/m ³
HPI100	3.58 kg	48 cm	62 cm	Toalhetes	32 - 34 kg/m ³
OSW100	2.5 kg	86.5 cm	57 cm	Toalhetes	32 - 34 kg/m ³

Cores - Colchões

**Premier Glide
Premier Visco**



Rosa Fuschia

**Excel
Propad Visco**



Azul



INVACARE® (Portugal) II - Material Ortopédico, Lda.
Rua Senhora de Campanhã, 105 · 4369-001 Porto
Tel.: +351-225 105 946 · Fax +351-225 105 739
Email: fabri@esoterica.pt · www.invacare.pt

